

# VITAMMY® nosalino



**ręczny  
aspirator do nosa  
dla dzieci**

# 3.0

**INSTRUKCJA UŻYWANIA**

---

## PRZEZNACZENIE

Zadaniem aspiratora do nosa jest usunięcie zalegającej wydzieliny i tym samym oczyszczenie przewodów nosowych i jam nosowych poprzez ssanie w celu złagodzenia objawów (np. zatkany nos, ucisk w nosie, wydzielina, wyciek z nosa, strup).

Sprzęt jest wielokrotnego użytku i dostarczany jest jako niesterylny.

---

## PRZECHOWYWANIE

Produkt ten należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego. Trzymać z dala od żrących cieczy i gazów.

---

## CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

### PO UŻYCIU

Aspirator należy opłukać ciepłą wodą. Należy pamiętać o wysuszeniu urządzenia, aby zapobiec jego starzeniu.

### PRZED UŻYCIEM

Głowicę ssącą należy dezynfekować poprzez gotowanie we wrzątku przez 2 minuty. Nie wolno dopuścić, aby głowica stykała się ze ściankami lub dnem naczynia z wrzątkiem.

---

## MATERIAŁY

Korpus butelki ssącej wykonany jest z PP (polipropylenu), głowica ssąca z poliwęglanu, a rura łącząca jest wykonana z silikonu.

---

## OPAKOWANIE

Opakowanie zawiera 1 aspirator do nosa.

---

## SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem należy wyczyścić produkt, następnie przyłożyć głowicę ssącą aspiratora do jednego z nozdrzy dziecka i pociągnąć dźwignię butelki ssącej, w celu wytworzenia ssania. Podciśnienie spowoduje odessanie wydzieliny z nosa dziecka.

Po odessaniu wydzieliny należy wytrzeć jamę nosową i usta dziecka ręcznikiem papierowym lub chusteczką a następnie wyczyścić aspirator do nosa i odłożyć do przechowywania.

## PRZECIWWSKAZANIA

- △ Nie należy używać aspiratora w przypadku poważnego zablokowania nozdrzy.
- △ Zabieg jest kategorycznie zabroniony u pacjentów z polipami nosa.

## OKRES PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

Okres przydatności do użycia wynosi 3 lata. Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu, nie należy go używać. Uszkodzony produkt należy wymienić.








## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI








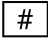

- △ Produkt musi być obsługiwany przez osobę dorosłą.
- △ Podczas stosowania, przednia część produktu nie powinna wnikać głęboko do jamy nosowej, lecz pozostawać jedynie w obrębie nozdrzy.
- △ Podczas stosowania dostosuj siłę ssania poprzez dobór intensywności pompowania.

## UTYLIZACJA

Aspirator należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami lub regulacjami po przekroczeniu ich okresu użytkowania. Szczegółowe informacje na temat utylizacji można uzyskać od dystrybutora, importera lub producenta.

## UŻYTE SYMBOLE I ZNAKI

SYMBOL	ZNACZENIE
	Producent
	Data produkcji
	Data przydatności do użycia
	Oznakowanie CE. Oznacza zgodność z regulacją Unii Europejskiej 2017/745 (MDR)
	Upoważniony przedstawiciel na terenie Wspólnoty Europejskiej
	Kod partii
	Patrz: instrukcja obsługi/broszura

SYMBOL	ZNACZENIE
	Ostrzeżenie lub przestroga
	Wyrób medyczny
	Chronić przed wilgocią
	Wyrób niesterylny
	Chronić przed światłem słonecznym
	Nie używać, gdy opakowanie jest uszkodzone
	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: (01) GTIN (10) Nr serii (11) Data produkcji
	Model
	Importer

---

# GWARANCJA

<b>URZĄDZENIE</b>	Aspirator do nosa VITAMMY NOSALINO
<b>GWARANT</b>	Novamed.pl S.A. Dr. Stefana Kopcińskiego 62D, 90-032 Łódź, Poland
<b>WSPARCIE TECHNICZNE</b>	Infolinia – tel. 887 11 00 66 e-mail: pomoc@novamed.pl
<b>GWARANCJA</b>	Gwarant zapewnia Nabywcę, że urządzenie VITAMMY, którego dotyczy niniejsza gwarancja, zostało zaprojektowane i wyprodukowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz o dobrej jakości urządzenia, brak wad materiałowych i produkcyjnych, które mogłyby zakłócać jego prawidłowe działanie. W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie niniejszej gwarancji Gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe bezpłatnie w możliwie krótkim terminie nie przekraczającym <b>14 dni</b> .
<b>TYP GWARANCJI</b>	Niniejsza gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt będzie dostarczony do serwisu na koszt Nabywcy, bezpłatnie naprawiony oraz bezpłatnie dostarczony z powrotem do Nabywcy.
<b>OKRES GWARANCJI</b>	12 miesięcy na urządzenie
<b>BIEG OKRESU GWARANCJI</b>	Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.
<b>OBSZAR BOWIĄZYWANIA GWARANCJI</b>	Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
<b>POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA USTERKI</b>	Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.
<b>WARUNKI WAŻNOŚCI GWARANCJI</b>	W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.

**OGRANICZENIA  
I WYŁĄCZENIA  
GWARANCJI**

Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednio, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie.

Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek:

- niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania
- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
- ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych
- przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania, itp.)

Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu.

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki.

Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi.

**PIECZĘĆ I PODPIS  
SPRZEDAWCY**

Data

Podpis klienta

# INFORMACJE KONTAKTOWE

 **Zhongshan Sunneo Medical Instruments Co.,Ltd.**

No.11, 1ST Licheng Road, Dongshen District, Xiaolan town, Zhongshan city,  
Guangdong province, P.R.C.

 **SUNGO Europe B.V.**

Fascinatia Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands

**NOVAMEDPL**



**NOVAMED.PL S.A.**

DR. STEFANA KOPCIŃSKIEGO 62D, 90-032 ŁÓDŹ, POLAND

Infolinia pomocy i wsparcia technicznego: 887 11 00 66

**VITAMMY.PL**

Wersja instrukcji: V1.03 22.06.2025