

Instrukcja obsługi alkomatu

ALCOLIFE Go



Dziękujemy za wybór naszego produktu. Zachęcamy do zapoznania się z jego działaniem oraz instrukcją obsługi.

Alkomat **ALCOLIFE Go** to jedno z najszybszych i nowoczesnych urządzeń na rynku. Dzięki połączeniu dwóch technologii alkomat staje się narzędziem wielozadaniowym.

Urządzenie ma możliwość wykonania 2 rodzajów badań - bezustnikowych, przesiewowych i tradycyjnych, ustnikowych.

ZALETY ALKOMATU ALCOLIFE Go:

- Sensor **elektrochemiczny**, technologia stosowana w alkomatach policyjnych
- **2 w 1** – użytkownik za pomocą jednego urządzenia ma możliwość wykonania testów bezustnikowych i ustnikowych
- Zapewnia stabilny i **wiarygodny** sposób pomiaru (pomiar dowodowy, ustnikowy)
- Bardzo szybki pomiar **bezustnikowy**, test trwa kilka sekund
- Możliwość badania na obecność alkoholu w **pojemnikach z płynami**
- Możliwość wyboru **jednostki pomiarowej** np. mg/L, mg/100mL, ‰ & %
- Idealny stosunek ceny, do jakości produktu

- Pokazuje **wyniki na wyświetlaczu**

DANE TECHNICZNE:

- Wyświetlacz: cyfrowy wyświetlacz LCD z trójkolorowym podświetleniem
- Funkcja szybkiego badania przesiewowego zawartości alkoholu z czujnikiem elektrochemicznym
- Zasilanie: 3*1.5V AAA Baterie alkaiczne
- Wyświetlacz: TFT 2.4" TFT QVGA
- Klawisze: 3 klawisze funkcyjne
- Ustawienie jednostek: mg/L, mg/100mL, ‰ & ‰
- Automatyczne monitorowanie przepływ powietrza
- Środowisko działania: Od -5°C do +45 °C
- Warunki długotrwałego przechowywania: Temperatura: 0° C to +55° C. Wilgotność względna: 30 do 90%
- Zakres wyświetlacza: 0.00-9.00 ‰ BAC lub 0.00-4.5mg/L
- Zatwierdzenie Agencji: CE
- Gwarancja: 3 lata na alkomat, 2 lata na sensor

PAMIĘTAJ: NIE WYKONUJ TESTU ZARAZ PO SPOŻYCIU ALKOHOŁU I WYPALENIU PAPIEROSA, MOŻESZ USZKODZIĆ SENSOR. Pomiaru powinny być wykonywane najwcześniej po 30 minutach od ostatnio spożytego alkoholu.

UWAGA: Jeśli baterie są zbyt słabe wymienić je na nowe. Zbyt małe napięcie może powodować problemy z wykonaniem testu.

WŁĄCZANIE ALKOMATU:

1. Aby włączyć alkomat naciśnij „” przez ok. 3 sekundy. Alkomat rozpocznie proces sprawdzania, wyświetli datę następnej kalibracji i przejdzie w „Tryb bezustnikowy”
2. Aby wyłączyć alkomat naciśnij „” przez ok. 3 sekundy.
Alkomat posiada funkcję automatycznego wyłączenia, po 5 minutach bezczynności.
3. W trybie „Bezustnikowy” alkomat jest gotowy do wykonania testu bezustnikowego. Wdmuchuj powietrze do urządzenia przez ok. 3 - 4 sek. Po chwili alkomat pokaże wynik na wyświetlaczu.

MENY GŁÓWNE:

4. **„Tryb Aktywny”** – stosowany do uzyskania precyzyjnych badań ustnikowych. W trybie tym, alkomat prezentuje wyniki na wyświetlaczu. Po przeprowadzonym badaniu użytkownik ma możliwość wpisania imienia i nazwiska osoby badanej oraz zapisania testu i jego późniejszego wydrukowania.

Aby wykonać test, załóż ustnik, uruchom „Tryb Aktywny” i wdmuchuj powietrze do ustnika przez ok. 5 – 6 sek.

W przypadku problemów z oddaniem próbki (zbyt słaby lub zbyt

krótki czas dmuchania) na urządzeniu pojawi się napis „Dmuchaj, Błąd”. Wykonaj test ponownie.

5. **„Tryb Bezustnikowy”** – przeznaczony do wykonywania szybkich badań bezustnikowych, przesiewowych. Wyniki z badania prezentowane są za pomocą cyfr – wynik cyfrowy, np. 0.50 promila

Aby wykonać test, w „Menu Główne” alkomatu wybierz „Tryb Bezustnikowy”. Osoba badana oddaje próbkę powietrza wdmuchując je do wlotu w alkomacie przez ok 3 sek. Po chwili na wyświetlaczu pojawi się wynik z testu. W tym trybie odległość ust osoby badanej od urządzenia nie powinna przekraczać 2 – 3 cm.

6. **„Pamięć”** – alkomat posiada funkcję zapisu wyników z pomiarów w trybie „Aktywnym” i „Pasywnym”. Użytkownik może wydrukować dane za pomocą oprogramowania (import danych do PC) lub drukarkę (opcjonalnie).

7. USTAWIENIA

- a) **Data i Czas** – za pomocą klawiszy funkcyjnych, użytkownik ma możliwość ustawienia aktualnej godziny. Brak możliwości modyfikacji daty.
- b) **Kontrast** – alkomat posiada funkcję ustawienia kontrastu wyświetlacza.
- c) **Dźwięk klawiszy** – funkcja wł/wył.
- d) **Jednostki** – aby skorzystać z tej opcji wpisz hasło: 0000, następnie wybierz jednostkę pomiarową i zaakceptuj.
- e) **Język** – wybierz język

- f) **Dane do druku** – przed przystąpieniem do drukowania/importu danych z alkomatu, uzupełnij: „Nazwa firmy”, „Miejscowość”, „Adres”. Informacje te prezentowane będą po każdym wydruku z pomiaru. Użytkownik podaje dane jednorazowo. Jeśli chcesz je zmodyfikować, wpisz dane ponownie.
 - g) **Kalibracja** – funkcja dostępna wyłącznie dla serwisu **ALCOLIFE**
 - h) **Wybierz drukarkę** – funkcja dostępna wyłącznie dla urządzeń zakupionych z drukarką Bluetooth
8. **Połącz z PC** – aby pobrać dane z alkomatu, uruchom oprogramowanie, podłącz kabel USB i naciśnij „Połącz z PC”. Następnie pobierz dane (wszystkie lub pojedyncze wyniki), zapisz je na dysku lub wydrukuj.

Link do oprogramowania:

http://alcolife.pl/alcolife_Go/ALCOLIFE_Go_oprogramowanie.zip

KALIBRACJA

Aby otrzymać dokładność wyników należy przeprowadzić profesjonalną re – kalibrację alkomatu pomiędzy 6 a 12 miesiącem użytkowania. Częstotliwość przeprowadzania kalibracji zależy od ilości wykonanych pomiarów (im więcej pomiarów tym alkomat częściej należy kalibrować), sposobu użytkowania oraz warunków

przechowywania

UWAGI

- Kiedy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub jest w niskiej temperaturze, będzie rozgrzewało się dłużej
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu w temperaturze pokojowej
- Unikaj gorąca lub dłuższego wystawiania na działanie słońca
- Wielokrotne używanie (w krótkich odstępach czasu) tego samego ustnika, może spowodować zalanie lub uszkodzenia sensora. Po każdym pomiarze zalecamy wymianę ustnika na nowy. Pozostające opary lub krople alkoholu mogą zawyżać pomiary.
- Podczas pobierania próby oddechu NIE blokuj wylotu
- Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii (nowych i używanych). Zużytych baterii nie należy pozostawiać w komorze baterii ponieważ mogą one powodować korozję i uszkodzenia urządzenia. Używaj tylko baterii alkalicznych.
- Jeżeli wynik badania był negatywny (wskazując 0.00) następne badanie może być przeprowadzone natychmiastowo. W przypadku wysokiego wyniku odczekaj kilka minut (2 - 3) przed wykonaniem kolejnego testu. Czas ten potrzebny jest, aby alkohol wyparował z czujnika. Pozostające w urządzeniu opary mogą powodować błędne odczyty. Czas parowania zależy od stężenia alkoholu w czujniku.
- Nie używaj urządzenia, aby podjąć decyzję, czy możesz prowadzić.
- Wyniki testu mogą być przedstawiane w sądzie (tylko dla alkomatu)

ze świadectwem wzorcowania)

Odpowiedzialność za właściwe działanie lub uszkodzenie

Nigdy nie rozkręcaj alkomatu. Jakakolwiek ingerencja, poluzowanie śrub lub uszkodzenie etykiety grozi utratą karty gwarancyjnej. Serwisowanie lub naprawa urządzenia poza serwisowym punktem HUMANCARE POLSKA oraz używanie urządzenia w niewłaściwy sposób, niezgodny z celem przeznaczenia, powoduje utratę gwarancji.

Producent, importer, dystrybutor lub sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub niepoprawność wyników wynikających z niewłaściwego użytkowania urządzenia.

Odczyty są wartościami służącymi tylko jako punkt odniesienia. Ani sprzedawca ani producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z użytkowania urządzenia. **Nie pij przed jazdą!**



Znak przekreślonego kosza informuje, że produkt ten jako odpad, może zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Polskie prawo pod karą grzywny zabrania wyrzucania zużytych części z tego urządzenia razem z innymi odpadami i nakazuje oddać je do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegając tego typu przepisu chronisz środowisko naturalne. W cenę tego produktu wliczono opłatę recyklingową. Powyższa informacji dotyczy również baterii, jeśli są dodane do urządzenia. Segreguj odpady.

**Informacje o Autoryzowanym Punkcie HUMANCARE POLSKA można
uzyskać na stronie:**

www.alcolife.pl lub pod adresem e-mail: serwis@alcolife.pl

HUMANCARE POLSKA, ul. Jesionowa 6, 55-040 Żerniki Małe

Tel. + 48 609 961 661

Made in PRC



Ver.16012024_PL