

neno[®] morello

termofor z pestek wiśni
dla niemowląt, dzieci i dorosłych

Do stosowania
na ciepło



Do stosowania
na zimno



Bezpieczne
dla skóry



@neno_polska

Poznaj Neno



neno
vita



neno
angelo



neno
lui

Zastosowanie na ciepło:

- bóle brzuszka • kolki • zatwardzenia • skurcze
- przechłodzenie mięśni • bóle menstruacyjne

Jak podgrzać termofor?

- w mikrofalówce o mocy 300-600 W max. 1 minuta
- w piekarniku rozgrzanym do 120°C, ok. 4 minut
- na grzejniku (pot. kaloryfer), aż termofor będzie wystarczająco podgrzany i ciepły

Produkt jest objęty 2-letnią gwarancją.

W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji prosimy o wysłanie wiadomości na adres: info@kgktrend.pl

Dystrybutor:

KGK TREND Sp. z o.o.

ul. Ujastek 5b, 31-752

Krakow, Polska

www.neno.pl



Dane wytwórcy:

Medi Partners Sp. z o.o.,

43-419 Hażlach,

ul. Słoneczna 1

Wyprodukowano w Polsce

Zastosowanie na zimno:

- nawrót laktacyjny • uderzenia • opuchlizna
- gorączka • ból głowy • ukąszenia insektów

Jak schłodzić termofor?

- w zamrażarce lub lodówce • należy włożyć w czystym i suchym woreczku foliowym, na około 30-60 minut.

Specyfikacja

- średnica: ok. 15 cm • waga: ok. 180 gramów
- tkanina: bawełna 100% • wypełnienie: pestki wiśni, idealnie wyczyszczone, nieuszkodzone i pochodzące z polskich upraw
- w przypadku zabrudzenia delikatnie przetrzeć wilgotną ściereczką • maksymalny czas kontaktu termoforu ze skórą (zimnego lub ciepłego) to 20 minut • uwalnianie subtelnego zapachu wiśni po podgrzaniu jest naturalnym zjawiskiem.

OSTRZEŻENIE: W przypadku odczuwania dyskomfortu lub podrażnienia skóry, należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu oraz skonsultować się z lekarzem.

Numer serii: TM142

KOD Basic UDI-DI: 590303142TermoforMDS8

Wyrób zgodny z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych

