


momcozy

LM 02

MASAŻER LAKTACYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

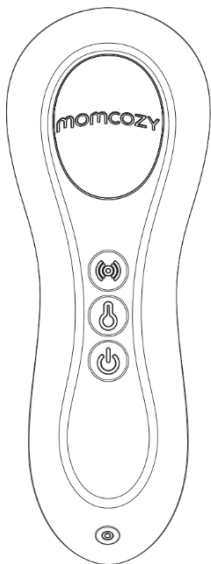

WAŻNE! NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I
POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z NINIEJSZYMI
INSTRUKCJAMI ORAZ ZACHOWAĆ JE NA
PRZYSZŁOŚĆ.

OSTRZEŻENIE

- Ten ugniatający masażer laktacyjny jest przeznaczony dla jednego użytkownika. Nie zaleca się jego wypożyczania ani udostępniania.
- NIE zezwalaj osobom niezaznajomionym z tym produktem na używać.
- NIE , jeśli kabel do ładowania lub produkt są uszkodzone. Skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta w celu wymiany.
- Jeśli obudowa lub przewody kabla ładującego poluzują się, rozdzielą lub postrzępią, należy natychmiast zaprzestać korzystania z kabla ładującego i skontaktować się z producentem urządzenia.
- Jeśli użytkownicy są niepełnosprawni fizycznie lub intelektualnie, przez cały czas wymagany jest nadzór rodzica lub opiekuna.
- Nie czyścić ani nie sterylizować produktu za pomocą pralki, kuchenki mikrofalowej lub zmywarki.
- Ten ugniatający masażer laktacyjny ma na celu pomóc kobietom w przezwyciężeniu niektórych wyzwań związanych z karmieniem piersią, takich jak nabrzmiące piersi lub zatkane kanaliki mleczne.
Proszę
należy go używać ściśle zgodnie z przeznaczeniem
opisanym w niniejszej instrukcji.
- Należy używać wyłącznie kabla do ładowania dostarczonego z urządzeniem.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Ugniatający masażer laktacyjny Momcozy jest przeznaczony do łagodzenia bólu i dyskomfortu związanego z karmieniem piersią, zatkanymi przewodami, porodem i zapaleniem sutka. Ponadto przyspiesza odciąganie pokarmu i przepływ mleka.

PRZEGLĄD ZESTAWU



Masażer laktacyjny



Kabel ładowania




Torba



Podręcznik
użytkownika

PRODUCT DESCRIPTION

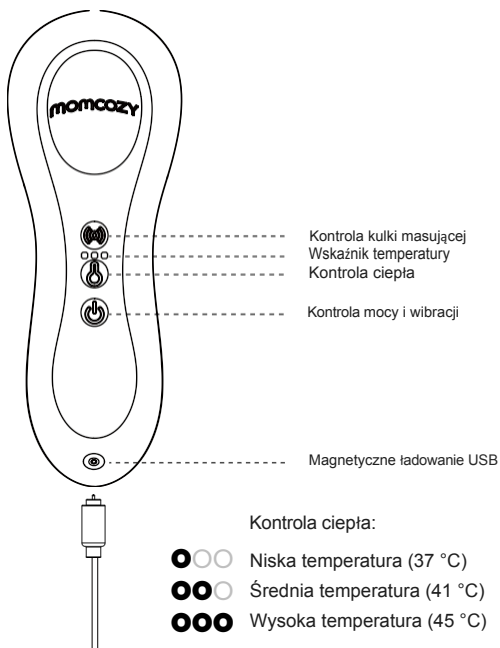


	Kontrola mocy/wibracji Naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 sekundy, aby przejść do trybu gotowości, a wskaźnik pozostanie świecący na biało. Po naciśnięciu przycisku zasilania masażer może zmieniać 6 wzorów wibracji.
	Sterowanie piłką do masażu W trybie gotowości krótkie naciśnięcie aktywuje kulki masujące. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje zmianę prędkości masażera niską/średnią/wysoką/pauzę.
	Kontrola ciepła W trybie gotowości, krótkie naciśnięcie przełącza z trybu niskiego (37 C)/średniego (41 %)/wysokie ciepło (45 %)/pauza.
	Wskaźnik baterii Podczas ładowania - wskaźnik będzie migał na biało. W pełni naładowany - wskaźnik będzie świecił na biało. Podczas - wskaźnik będzie świecił na biało. Niski poziom naładowania baterii - wskaźnik będzie migał na biało i zgaśnie po wyczerpaniu baterii.

ŁADOWANIE MASAŻERA


1. Podłącz dostarczony kabel charpinp do masażera
2. Podłącz USB do komputera lub adaptera USB (DC 5V 1.5A).
3. Wskaźnik będzie migać na biało podczas ładowania akumulatora.
4. Masażer jest w pełni naładowany, gdy wskaźnik na biało.
5. Pełne naładowanie urządzenia zajmuje około 1,5 godziny. Masażer należy ładować w razie potrzeby.

SPOSÓB UŻYCIA


1. Użyj kulek do masażu, aby dotrzeć głębiej do przewodów piersiowych i delikatnie masuj zatkany obszar piersi.

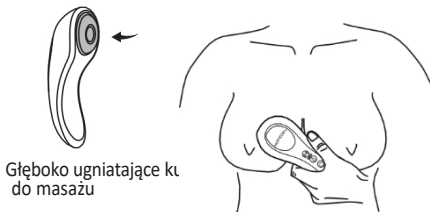

2. Masuj zatłokany obszar na piersi pomocą wygodnego wzorca wibracji.

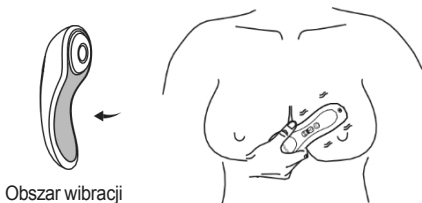

3. Odczekaj kilka minut, aż masażer osiągnie pełną temperaturę i ogrzeje pierś, aby stymulować przepływ mleka.

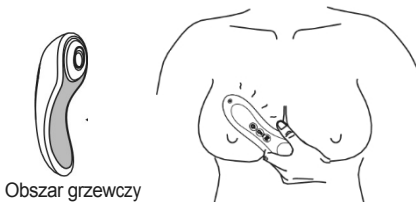

4. Masuj zatłaczony obszar na piersi zakrzywioną stroną, przesuwając się w kierunku sutka.



Masuj zatłaczony obszar zakrzywioną stroną

Uwaga:

1. Podczas nagrzewania urządzenie przełączy się z wysokiej temperatury na niską po 20 minutach. Wyłączy się po 30 minutach ogrzewania.
2. Nie można go włączyć podczas ładowania.
3. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator.
4. Odczekaj kilka minut, aż masażer osiągnie pełną temperaturę.

PIELĘGNACJA I PRZECHOWYWANIE

- Masażer należy zawsze czyścić przed i po każdym użyciu.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Czyścić ciepłą wodą.
- NIE zanurzać masażera w wodzie.
- Pozostawić masażer do wyschnięcia na powietrzu.
- Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
- Masażer należy przechowywać w czystym i wolnym od kurzu miejscu.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu: Ugniatający Masażer Laktacyjny

Model: LM02

Kolor: czerwono-niebiesko-zielony

Waga netto: 150 g

Napięcie wejściowe: DCSV 1.SA

Temperatura pracy: 0 °C do 47 °C

Temperatura przechowywania: -10 °C do 60 °C

Rozmiar produktu: 152 mm * 55 mm * 51 mm

Pojemność baterii: 1200mAh

Rozmiar opakowania: 176*86*58 mm

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI FCC

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga:

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik jest zachęcany do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

Podłącz urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.



Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE: Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.



Deklaracja zgodności z UE

Niniejszym BATNA Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw:

Dyrektywa 2014/30/UE (EMC – kompatybilność elektromagnetyczna) – zapewnia, że urządzenie nie zakłóca innych sprzętów i nie jest podatne na zakłócenia.

Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS) – ogranicza stosowanie substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, oraz 2015/863/EU.

Dyrektywa 2014/35/UE (LVD – niskonapięciowa)