


momcozy

Laktator Momcozy S9 Pro

Instrukcja obsługi

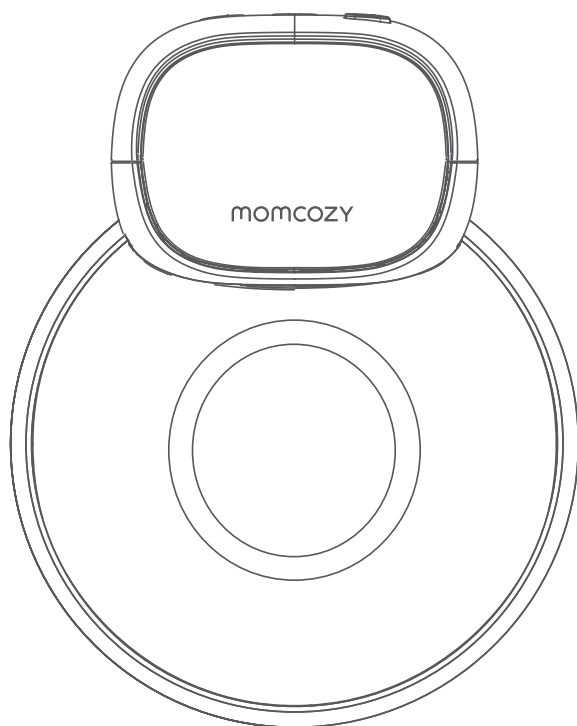

Wprowadzenie do produktu

Laktator Momcozy został stworzony z myślą o kobietach karmiących piersią, umożliwiając odciąganie i pobieranie mleka z piersi. Dzięki generowanemu podciśnieniu wokół brodawki sutkowej, laktator skutecznie umożliwia ekstrakcję mleka, które gromadzi się w specjalnym pojemniku.

Urządzenie oferuje dwa tryby pracy: stymulacji i odciągania. W trybie stymulacji laktator wykonuje szybkie i krótkie ssanie, aby rozpocząć przepływ mleka. Z kolei w trybie odciągania urządzenie ssa wolniej i głębiej, aby efektywnie zebrać pokarm. Zestaw do odciągania mleka wyposażony jest w silikonową membranę, która zapobiega przedostawaniu się mleka do systemu próżniowego, tworząc fizyczną barierę między mlekiem a systemem.

Laktator przeznaczony jest do użytku indywidualnego.

OSTRZEŻENIE

1. Jeśli jesteś matką zakażoną wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem zapalenia wątroby typu C lub wirusem niedoboru odporności ludzkiej (HIV), odciąganie pokarmu nie zmniejszy ani nie wyeliminuje ryzyka przeniesienia wirusa na dziecko za pośrednictwem mleka kobiecego.
2. Laktatorów elektrycznych przeznaczonych dla pojedynczych użytkowników nie należy nigdy wypożyczać ani dzielić się nimi z innymi.
3. Kobiety w ciąży nie powinny używać laktatora, gdyż może to wywołać skurcze lub przedwczesny poród.
4. Laktator przenośny (S9 Pro) nie jest przeznaczony do użytku podczas transportu lotniczego.
5. Ten produkt jest produktem do pielęgnacji osobistej do użytku prywatnego, którego nie należy udostępniać innym osobom. Udostępnianie go innym osobom może powodować zagrożenia dla zdrowia. Ponadto zużycie lub awaria spowodowana użytkowaniem przez inne osoby nie jest objęta gwarancją.
6. Jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone, zamoczone w wodzie lub znajdują się w innych sytuacjach uniemożliwiających ich normalne działanie, prosimy nie używać tego produktu.
7. Jeśli chcesz wyczyścić silnik pompy; przetrzyj go tylko czystą, suchą lub moką szmatką. Nie myj go ani nie mocz w wodzie ani środkiem dezynfekującym.
8. Nie należy używać żadnych środków chemicznych do czyszczenia kołnierza silikonowego, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie lub zagrożenie dla zdrowia.

Należy używać wyłącznie oryginalnych części tej pompki, nie należy modyfikować części ani używać części pochodzących z innych produktów, ponieważ może to spowodować awarię.

10. Poza elementami składowymi tego produktu, nie należy wkładać do niego żadnych innych przedmiotów.

11. Nie należy używać pompki, gdy jest podłączona do ładowarki.

12. Nie zanurzaj silnika pompy w wodzie.

13. Nie umieszczaj pompki w lodówce ani zamrażarce.

14. Nie przechowuj części, gdy są jeszcze mokre, gdyż może to spowodować rozwój zarazków lub zanieczyszczeń.

15. Nie podgrzewaj mleka matki w kuchence mikrofalowej.

16. Jeśli chcesz rozmrozić przechowywane mleko matki, pozwól mu rozmrozić się naturalnie. Nie wlewaj gorącej wody do torebki ani nie mocz torebki w gorącej wodzie, aby rozmrozić, ponieważ może się zepsuć lub wpłynąć na smak.

17. Jeśli nie możesz wypić od razu niezamrożonego mleka, wylej je, zamiast ponownie wkładać do lodówki lub zamrażarki.

18. Do przechowywania świeżo odciągniętego pokarmu należy używać nowego woreczka, nie należy wkładać świeżego mleka do woreczków, w których wcześniej przechowywano pokarm.

19. Nie mieszaj świeżego mleka matki z niezamrożonym mlekiem w celu jego wypicia.

21. Jeśli odczuwa się dyskomfort, można przerwać ssanie wkładając palec pomiędzy pierś a kołnierz.

22. Jeśli wystąpi podrażnienie lub dyskomfort, należy przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem.

23. Jeśli obudowa lub okablowanie kabla ładującego USB typu C poluzuje się, oddzieli lub przetrze się, natychmiast przerwij korzystanie z kabla ładującego i skontaktuj się z producentem urządzenia.

Natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia, jeśli zauważysz dym lub oparzenia z jednostki pompującej lub kabla ładującego.


24. Podczas odciągania należy kontrolować poziom mleka, aby zapobiec jego przepełnieniu.

25. Jeśli podczas odciągania pokarmu za pomocą laktatora S9 Pro Wearable poczujesz nadmierne ciepło, natychmiast przerwij odciąganie i wyjmij laktator.

26. Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie powierzchnie kołnierza silikonowego, zaworu silikonowego, membrany silikonowej, silnika pompy, łącznika i zbiornika na mleko są czyste.
27. Przed użyciem należy upewnić się, że kołnierz silikonowy, zawór silikonowy, membrana silikonowa, silnik pompy, łącznik i zbiornik na mleko zostały zmontowane i prawidłowo podłączone do pompy.
28. Należy regularnie sprawdzać wszystkie części, aby mieć pewność, że nie występują w nich oznaki zużycia, uszkodzenia lub pogorszenia jakości.
29. Jeśli paczka jest uszkodzona lub naruszona, gdy do Ciebie dotrze, nie otwieraj jej ani nie używaj produktu. Skontaktuj się z naszą grupą obsługi klienta w celu wymiany.
30. Żadna część pompy nie jest odporna na wysokie temperatury, dlatego należy trzymać ją z dala od źródeł ciepła.
31. Podczas użytkowania lub ładowania pompy nie należy używać produktów łatwopalnych ani zbliżać się do źródeł łatwopalnych.
32. Nie używaj pompki podczas leżenia, rozciągania się lub wykonywania intensywnych ćwiczeń.
33. Nie używaj pompki podczas snu lub gdy czujesz się śpiący.
34. Nie należy nosić laktatora, gdy nie karmisz piersią.
35. Nie należy używać pompki podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi ciężkich maszyn.
36. W miejscach położonych na dużych wysokościach, nawet w kabinach ciśnieniowych, wydajność pompy może być ograniczona.
37. Częstotliwość sprzętu komunikacyjnego może mieć wpływ na wydajność tej pompy.
38. Lamator jest przeznaczony do odciągania pokarmu z piersi, dlatego należy go używać ściśle według celu opisanego w niniejszej instrukcji.


Opis produktu

Momcozy Wearable Breast Pump S9 Pro jest przeznaczony do odciągania pokarmu od karmiących kobiet w celu zbierania mleka z piersi. Urządzenie jest przeznaczone dla jednego użytkownika.

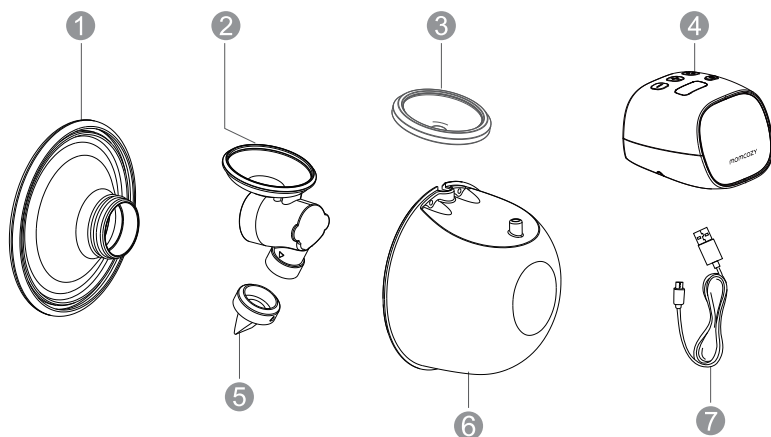

- 1 Lejek
- 2 Łącznik
- 3 Membrana
- 4 Jednostka główna
- 5 Zawór silikonowy
- 6 Kolektor mleka (180 ml)
- 7 Kabel USB typu C

Panel sterowania

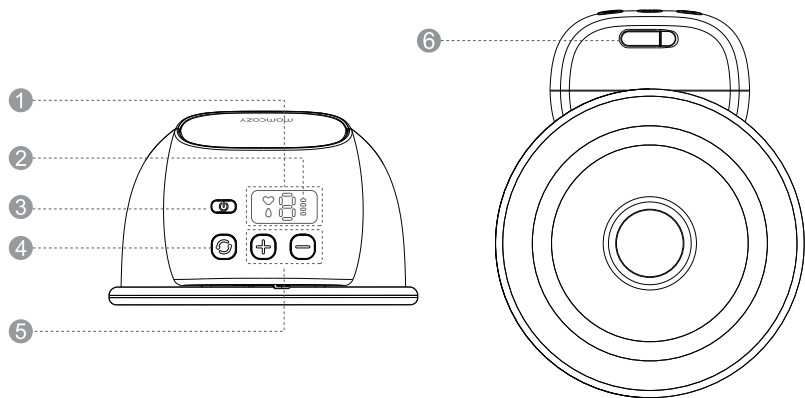

- 1 Wyświetlacz LED
- 2 Wskaźnik poziomu naładowania
- 3 Włączanie/Wyłączanie/Pauza
- 4 Wybór trybu
- 5 Zwiększanie/zmniejszanie
- 6 Port ładowania

Przyciski	Funkcje
	Długie naciśnięcie i przytrzymanie powoduje włączenie/wyłączenie; krótkie naciśnięcie powoduje wstrzymanie, a następnie naciśnięcie dowolnego przycisku w celu kontynuowania sesji odciągania.
	Wybór trybu
	Zmniejszenie siły ssania
	Zwiększenie siły ssania
	Tryb stymulacji: W tym trybie laktator rozpoczyna szybkie i krótkie ssanie, aby mleko zaczęło płynąć.

	Tryb odciągania: Laktator rozpoczyna powolne odciąganie mleka, ssąc głębiej i wolniej.
	Wyświetlacz poziomu ssania: Laktator posiada 9 poziomów ssania do wyboru.
	Wyświetlacz stanu naładowania


Opis wskaźnika naładowania akumulatora		
	Niski poziom naładowania	Pierwszy pasek wskaźnika miga
	Ładowanie	Gdy produkt jest naładowany, wskaźniki zapalają się jeden po drugim, wyświetlając rosnący procent od 25%, 50%, 75%, do 100%, a następnie wyłącza się i powtarza ten proces, aż produkt zostanie w pełni naładowany.
	Pełne naładowanie	Biały jednolity

Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym użyciem produktu należy go naładować. Laktator jest zasilany wewnętrznym akumulatorem litowym.


Nasze produkty są dostarczane z kablem do ładowania (USB2.0/Type-C), ale nie z zasilaczem. Przed rozpoczęciem ładowania należy samodzielnie zakupić zasilacz. Upewnij się, że kupiłeś zasilacz, który pasuje do interfejsu USB 2.0 i upewnij się, że moc wejściowa zasilacza to AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz, a moc wyjściowa to DC 5 V 1A.

- Miganie pierwszego paska wskaźnika naładowania oznacza, że akumulator jest rozładowany i pozostało 30 minut czasu użytkowania. Należy naładować urządzenie na czas.
- Po pełnym naładowaniu urządzenie może być używane przez 8-9 sesji (około 270 minut odciągania), po 30 minut na sesję.

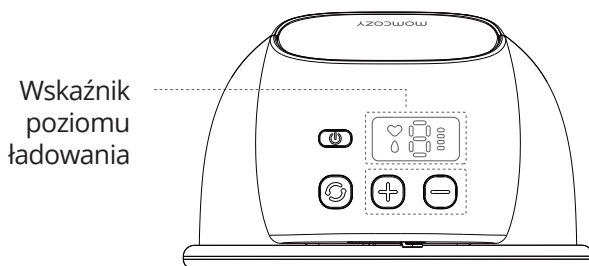

Naładuj akumulator zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Podłącz końcówkę USB kabla ładującego do interfejsu USB zasilacza;
- Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda sieciowego;
- Podłącz końcówkę kabla ładującego typu C do portu ładowania.

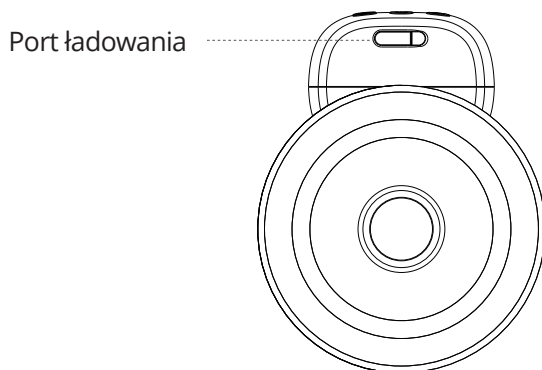

Pełne naładowanie urządzenia trwa około 150 minut, a podczas ładowania wskaźnik naładowania akumulatora zapala się jeden po drugim, wyświetlając rosnącą wartość procentową akumulatora od 25%, 50%, 75% do 100%, a następnie wyłącza się i powtarza ten proces, aż do pełnego naładowania akumulatora. W ten sposób, gdy akumulator jest w pełni naładowany, cztery kontrolki zawsze świecą na białą. Odłącz zasilacz od gniazdka, odłącz kabel ładujący od zasilacza i jednostki głównej po zakończeniu ładowania.

Uwaga:

- Laktator nie może być używany podczas ładowania!
- Kabel do ładowania służy wyłącznie do podłączenia zasilacza i laktatora Momcozy w celu ładowania, nie należy podłączać go do innych urządzeń. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym!
- Jeśli obudowa zasilacza poluzuje się, oddzieli lub postrzępi, należy natychmiast zaprzestać korzystania z zasilacza i skontaktować się z jego producentem.
- Jeśli kabel ładowania jest uszkodzony, złamany lub pęknięty, należy natychmiast zaprzestać korzystania z kabla ładowania i skontaktować się z producentem w celu wymiany na nowy (informacje kontaktowe znajdują się na ostatniej stronie niniejszej instrukcji).
- Należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia, jeśli z pompy lub zasilacza zacznie wydobywać się dym lub spalenizna.

Korzystanie z niewłaściwego typu zasilacza lub zakup zasilacza niskiej jakości może zmniejszyć bezpieczeństwo urządzenia oraz spowodować uszkodzenie mienia i zdrowia użytkownika. Należy zakupić zasilacz medyczny spełniający normy IEC 60601-1 i IEC 60601-1-2 obowiązujące na profesjonalnych rynkach medycznych i upewnić się, że wyjście zasilacza wynosi 5 V DC 1 A.

- Po pełnym naładowaniu akumulatora, jeśli czas pracy akumulatora jest krótszy niż wcześniej i chcesz go wymienić, nie próbuj samodzielnie wymieniać akumulatora.
- W celu wymiany należy skontaktować się z producentem. Samodzielny demontaż i wymiana akumulatora może spowodować uszkodzenie jednostki głównej i akumulatora.
- Gdy produkt nie jest używany przez dłuższy czas, akumulator rozładowuje się powoli. Aby
aby uniknąć uszkodzenia akumulatora z powodu niskiego napięcia przez długi czas, należy ładować urządzenie co trzy miesiące.

Czyszczenie i dezynfekcja

Ogólny opis/wymagania

Utrzymanie części laktatora w czystości jest niezwykle ważne, ponieważ resztki mleka matki mogą stanowić środowisko dla rozwoju bakterii i innych drobnoustrojów. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże uniknąć zanieczyszczeń i zapewni ochronę dziecka przed infekcjami. W przypadku wcześniaków lub dzieci z innymi problemami zdrowotnymi, zalecenia dotyczące bezpiecznego odciągania mleka mogą pochodzić od personelu medycznego.

PRZED KAŻDYM UŻYCIEM

Upewnij się, że zestaw jest czysty i odpowiednio zmontowany.
Przetrzyj silnik pompy chusteczkami dezynfekującymi.

PO KAŻDYM UŻYCIU

Bezpiecznie przechowuj mleko: Odciągnięte mleko matki przechowuj w specjalnych woreczkach lub pojemnikach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Upewnij się, że pojemniki są wykonane ze szkła lub plastiku, mają szczelne pokrywy i zostały odpowiednio oznaczone datą oraz godziną. Następnie niezwłocznie umieść je w lodówce, zamrażarce lub torbie z lodem.

Oczyść obszar odciągania: Przetrzyj silnik urządzenia chusteczkami dezynfekującymi.

Części wymagające czyszczenia i dezynfekcji



Wyczyść i zdezynfekuj wszystkie części, które miały kontakt z piersią i mlekiem matki przed pierwszym użyciem laktatora oraz po każdym użyciu.

Części mające kontakt z mlekiem: elementy zestawu do zbierania mleka, w tym lejek, łącznik, membrana, zawór i kolektor mleka.

Części, które stykają się tylko ze skórą piersi: lejek.

Przed czyszczeniem/dezynfekcją

- a. Dokładnie umyj ręce wodą z mydłem przez 20 sekund.
- b. Zdemonstuj wszystkie części zgodnie z poniższą instrukcją:

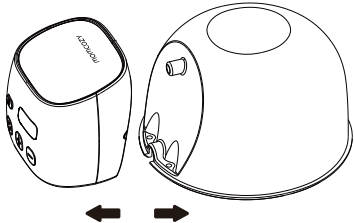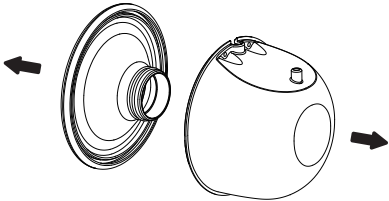	
1) Oddziel silnik produktu od głównego korpusu.	2) Odłącz lejek od kolektora mleka.
	
3) Oddziel łącznik od kolektora mleka.	4) Zdemontuj membranę i zawór z łącznika.

Nigdy nie zanurzaj urządzenia głównego, kabla do ładowania ani adaptera (jeśli został zakupiony) w wodzie lub nie umieszczaj ich w zmywarce, ponieważ może to prowadzić do trwałego uszkodzenia tych elementów.

Czyszczenie i dezynfekcja części mających kontakt z mlekiem

Czyszczenie

Urządzenie należy czyścić ręcznie! Bezpieczeństwo korzystania ze zmywarki do czyszczenia i dezynfekcji tego produktu nie zostało potwierdzone.


Ostrzeżenie

Nie używaj środków czyszczących o działaniu antybakteryjnym ani ściernych do czyszczenia części laktatora, ponieważ mogą one spowodować ich uszkodzenie.

Najpierw rzygotuj poniższe elementy:


- Mydło i gorąca woda
- Woda o jakości wody pitnej
- Czysta umywalka używana wyłącznie do artykułów do karmienia niemowląt -
- Czysta szczotka używana wyłącznie do artykułów do karmienia niemowląt -
- Nieużywany ręcznik do naczyń lub ręcznik papierowy

Płukanie: Opłucz części zestawu do zbierania mleka i wszelkie inne elementy do karmienia, trzymając je pod bieżącą wodą w celu usunięcia resztek mleka lub brudu. Woda może być ciepła lub zimna, w zależności od preferencji.

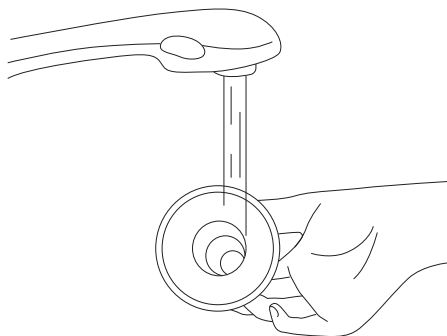

Umyj części do pobierania mleka:


- Umieść części zestawu do pobierania mleka w czystej umywalce używanej wyłącznie do mycia elementów do karmienia niemowląt. Nie myć bezpośrednio w zlewie, ponieważ może on zawierać zarazki, które mogą zanieczyścić te elementy. -
- Moczyć części zestawu do pobierania mleka w ciepłej wodzie z mydłem o temperaturze 40-60°C przez 3-5 minut.

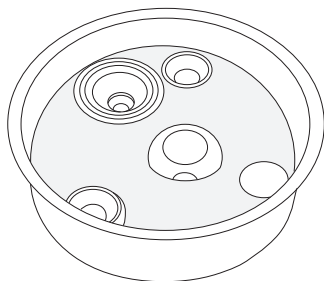

Używaj czystej szczoteczki przeznaczonej wyłącznie do akcesoriów do karmienia niemowląt.

4) Ponowne płukanie: Płucz elementy pod bieżącą wodą lub zanurz je w świeżej wodzie w osobnej misce, która jest używana wyłącznie do czyszczenia akcesoriów do karmienia niemowląt. Jeśli zabrudzenia są nadal widoczne, powtórz krok 3 i płucz ponownie, aż zabrudzenia zostaną usunięte.

5) Dokładne wysuszenie na powietrzu: Umieść części zestawu do zbierania mleka, umywalkę oraz szczotkę do butelek na czystym, nieużywanym ręczniku do naczyń lub ręczniku papierowym w miejscu chronionym przed kurzem i brudem. Nie używaj ręczników do wycierania lub osuszania przedmiotów, ponieważ może to spowodować przeniesienie zarazków!

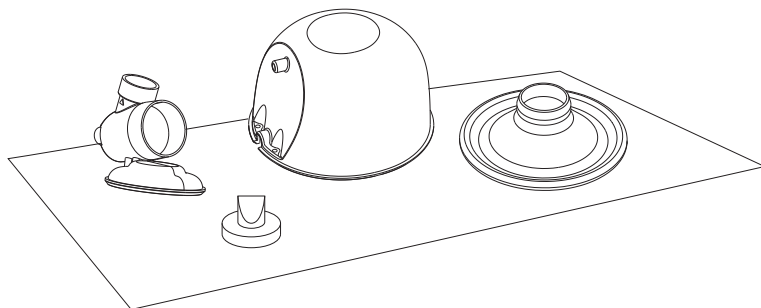

6) Czyszczenie umywalki i szczotki do butelek: Umywalki i szczotki należy dobrze umyć i pozostawić do wyschnięcia po każdym użyciu. Co kilka dni myj je ręcznie ciepłą wodą z mydłem. Jeśli dziecko ma mniej niż 3 miesiące, urodziło się przedwcześnie, ma osłabiony układ odpornościowy z powodu choroby (np. HIV) lub leczenia (np. chemioterapia), należy myć umywalkę i szczotkę do butelek po każdym użyciu.

Po czyszczeniu:

Aby dodatkowo usunąć zarazki, dezynfekuj części zestawu do pobierania mleka, umywalki i szczotki do butelek przynajmniej raz dziennie po ich wyczyszczeniu. Przedmioty można dezynfekować za pomocą wrzącej wody lub przy użyciu ustawienia dezynfekcji. Dezynfekcja jest szczególnie ważna, jeśli dziecko ma mniej niż 3 miesiące, urodziło się przedwcześnie lub ma osłabiony układ odpornościowy z powodu choroby lub leczenia.

Aby zdezynfekować części mające kontakt z mlekiem, przejdź do dezynfekcji.

Dezynfekcja

Uwaga: Nie sterylizuj części produktu w kuchence mikrofalowej ani sterylizatorze UV. Wysoka temperatura ($>110^{\circ}\text{C}$) może skrócić ich żywotność i stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

Przed dezynfekcją upewnij się, że zestaw do pobierania mleka, szczotki do butelek i umywalki zostały odpowiednio wyczyszczone przy użyciu powyższych metod.

Zdezynfekuj wszystkie przedmioty mające kontakt z mlekiem (w tym szczotki do butelek i umywalkę) za pomocą jednej z poniższych metod.

1) Przygotuj poniższe przedmioty:

Garnek domowy


Woda zdatna do picia

Czyste szczypce


Uwaga:

Podczas dezynfekcji wrzącą wodą należy uważać, aby butelki lub inne części nie dotykały ścianek naczynia, ponieważ może to spowodować nieodwracalną deformację lub uszkodzenie produktu.


2) Umieść zdemontowany zestaw do zbierania mleka w garnku i napełnij garnek wystarczającą ilością wody, aby przykryć elementy do dezynfekcji. Pozwól wodzie gotować się przez 5-10 minut, upewniając się, że części nie dotykają ścianek garnka.

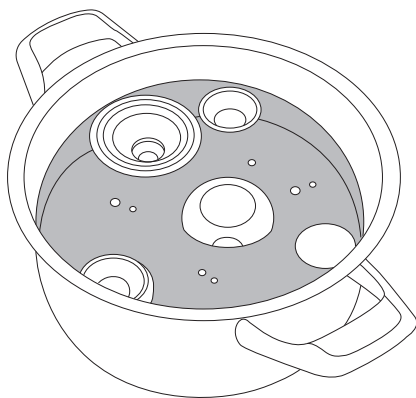

3) Wyjmij przedmioty za pomocą czystych szczypiec.

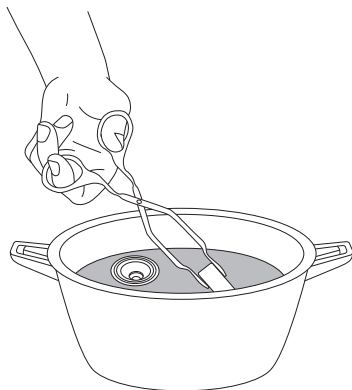

4) Dokładnie wysusz.

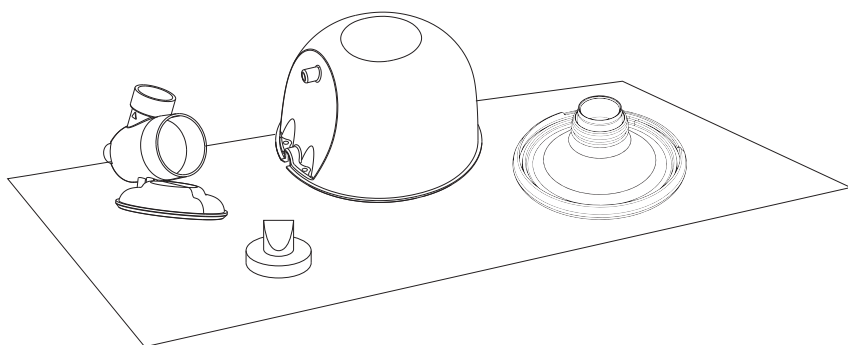

Bezpieczne przechowywanie

Suche przedmioty należy bezpiecznie przechowywać do czasu, aż będą potrzebne. Upewnij się, że czyste części pompy, szczotki do butelek dokładnie wyschły przed przechowywaniem. Przedmioty muszą być całkowicie suche, aby zapobiec rozwojowi zarasków i pleśni. Suche przedmioty należy przechowywać w czystym, chronionym miejscu, aby zapobiec ich zanieczyszczeniu.

1. Dokładnie umyj ręce wodą z mydłem.
2. Złóż czyste, suche części pompy.
3. Umieść ponownie zmontowane części pompki i inne elementy do karmienia, suchą szczotkę do butelek w czystym, chronionym miejscu, np. w zamkniętej szafce kuchennej, która jest używana wyłącznie do przechowywania czystych naczyń.

Czyszczenie / dezynfekcja pozostałych części

Obudowę jednostki głównej należy wyczyścić i zdezynfekować po pierwszym użyciu oraz po każdym kolejnym. Pozostałe części, które nie mają kontaktu z ciałem ani mlekiem podczas odciągania pokarmu, należy czyścić tylko w przypadku zabrudzenia.

Czyszczenie i dezynfekcję należy przeprowadzać w temperaturze pokojowej (5°C - 40°C), zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Przygotuj poniższe elementy:

Środek dezynfekujący

Chusteczki nasączone 70% alkoholem izopropylowym

Czysta, miękka ściereczka

Metoda czyszczenia:

Przed przystąpieniem do czyszczenia, umyj urządzenie środkiem dezynfekującym. Za pomocą czystej, miękkiej szmatki usuń wszelkie zanieczyszczenia z jednostki głównej i kabla do ładowania.

Chusteczką nasączoną 70% alkoholem izopropylowym przetrzyj części urządzenia, aż nie pozostaną żadne widoczne zabrudzenia.

Wysusz urządzenie, pozostawiając je na 10 minut w temperaturze pokojowej, aby odparowały resztki środka czyszczącego.

Metoda dezynfekcji:

Czyszczenie obudowy jednostki głównej wykonaj zgodnie z powyższą metodą przed przystąpieniem do dezynfekcji.

Dezynfekuj obudowę jednostki głównej za pomocą miękkiej ściereczki nasączonej 70% izopropanolem przez 3 minuty.

Wysusz, pozostawiając jednostkę główną na 10 minut w temperaturze pokojowej, aby odparowały resztki roztworu dezynfekującego.

Przygotowanie przed użyciem

UWAGA:


Umyj ręce wodą z mydłem, a następnie sprawdź i zmontuj czysty zestaw.

Czas trwania sesji odciągania:


Produkt jest zasilany akumulatorem litowym, który po pełnym naładowaniu pozwala na używanie urządzenia przez 8-9 sesji (około 270 minut pompowania, 30 minut na sesję). Typowa sesja odciągania trwa około 10-15 minut na każdą pierś, ale należy odciągać pokarm tylko tak długo, jak jest to wygodne i efektywne.

Laktator jest wyposażony w silikonowy lejek o średnicy 24 mm.

Jeśli lejek dołączony do laktatora nie pasuje, dostępne są również inne rozmiary lejków do zakupu osobno.

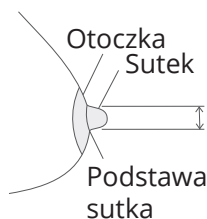

Za mały lejek

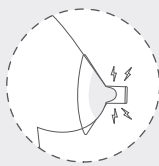


Odpowiedni lejek



Za duży lejek



Dobierz odpowiedni biustonosz


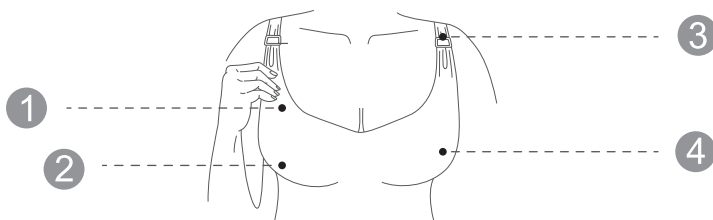


1 Wykonany z elastycznego materiału

2 Bez fiszbin i wyściółki

3 Posiada kłapkę

4 Pełne pokrycie

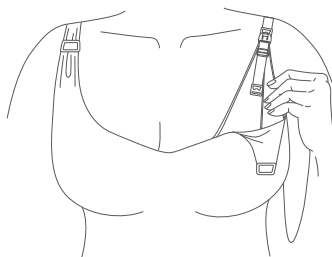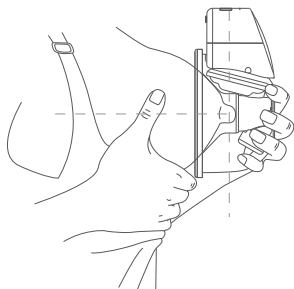

BRĄK ODSTĘPÓW

Po włożeniu laktatora do biustonosza silikonowy lejek laktatora powinien być mocno dociśnięty do skóry, bez żadnych luznych miejsc.

JĘŚLI SIĘ PORUSZA

Jeśli poczujesz, że laktator porusza się podczas użytkowania, zaciśnij pasek biustonosza, aby ponownie wyregulować laktator, lub wybierz inny biustonosz.

Zalecana postawa

Uwaga:

Podczas odciągania pokarmu należy zawsze siedzieć lub stać w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekaniu mleka. Z laktatora nie należy korzystać w pozycji leżącej lub podczas snu, aby zapewnić utrzymanie prawidłowej orientacji podczas użytkowania.

POSTAWA

Należy upewnić się, że laktator i zbiornik na mleko są zawsze ustawione pod kątem pionowym. W przeciwnym razie, mleko będzie się wylewać.









Montaż

Uwaga:

Prawidłowe umieszczenie kołnierza, membrany, kolektora mleka, zaworu, łącznika itp. jest kluczowe dla wytworzenia odpowiedniego podciśnienia przez laktator. Przed każdym użyciem sprawdź wzrokowo poszczególne elementy pod kątem pęknięć, wyszczerbień, rozdarć, odbarwień lub innych uszkodzeń. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, zaprzestań używania urządzenia do momentu wymiany uszkodzonych części.

Dokładnie umyj ręce wodą z mydłem, a następnie zmontuj produkt zgodnie z poniższymi krokami:

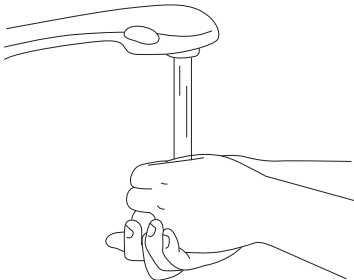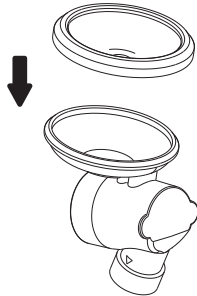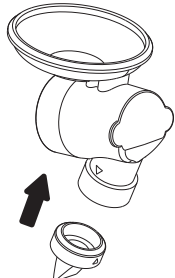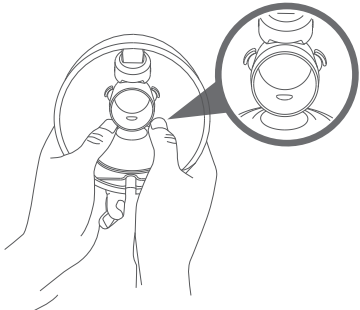	
1. Dokładnie umyj ręce wodą z mydłem.	2. Umieść silikonową membranę w łączniku i delikatnie dociśnij wokół krawędzi, aż silikonowa membrana dobrze uszczelni się z łącznikiem.
	
3. Połącz silikonowy zawór z końcem łącznika i lekko dociśnij, aby silikonowy zawór dobrze przylegał do łącznika.	4. Umieść zmontowaną część łącznika w kolektorze mleka i wyrównaj wycięcie "ucha" łącznika z wewnętrznym rowkiem kolektora mleka. Wciśnij silikonową membranę w okrągły otwór kolektora mleka, aby dobrze do niego pasowała.

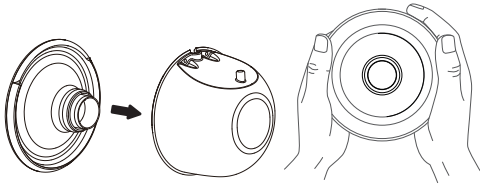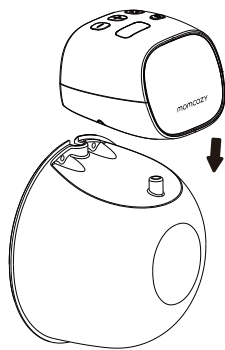	
5. Połącz lejek z korpusem. Upewnij się, że lejek dobrze przylega do obręczy, dociskając go kciukami.	6. Włóż cylindryczny występ znajdujący się na kolektorze mleka do otworu na silniku pompy, a następnie wyrównaj rowek na kolektorze mleka z wycięciem na silniku pompy.


Instrukcje dotyczące odciągania pokarmu

Ostrzeżenie


- Przed zdjęciem korpusu laktatora z piersi należy zawsze wyłączyć laktator, aby zwolnić podciśnienie.
- Jeśli nie uda się odciągnąć mleka, nie należy kontynuować odciągania przez dłużej niż 5 minut. Spróbuj odciągnąć pokarm o innej porze w ciągu dnia.
- Jeśli odciąganie pokarmu staje się bardzo niewygodne lub bolesne, należy zaprzestać korzystania z laktatora i skonsultować się z lekarzem.
- Monitoruj poziom mleka podczas odciągania, aby nie dopuścić do jego przepełnienia.

1. Wyrównanie


- a. Przed przystąpieniem do odciągania pokarmu należy upewnić się, że lejek jest dobrze dociśnięty do piersi.

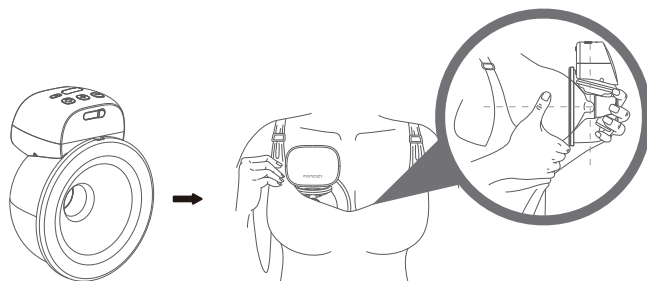

- b. Aby wyrównać, przytrzymaj lejek przy piersi, aby sprawdzić, czy sutek jest wyśrodkowany w tunelu lejka. Może być konieczne pochylenie się do przodu.
- c. Po wyrównaniu, spójrz przez lejek, aby potwierdzić, że sutek jest wyśrodkowany przed odciąganiem pokarmu. Końcówka brodawki sutkowej NIE powinna dotykać górnej, bocznej ani dolnej części tunelu lejka. Jeśli tak jest, spróbuj ponownie.

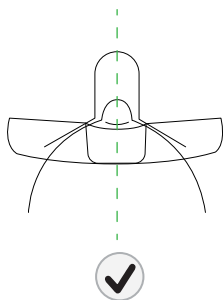

Prawidłowe
wyrównanie


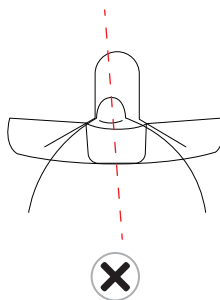


Nieprawidłowe
wyrównanie

Uwagi:

Prawidłowe ułożenie brodawek sutkowych ma kluczowe znaczenie dla komfortu i wydajności odciągania pokarmu. Sutki muszą być prawidłowo umieszczone w tunelu lejka przed odciąganiem pokarmu, aby uniknąć dyskomfortu.

Zamocuj laktator w staniku, uważając, aby mocno przylegała do piersi. W razie potrzeby zaciśnij biustonosz, aby utrzymać laktator na miejscu i rozpocznij odciąganie pokarmu.

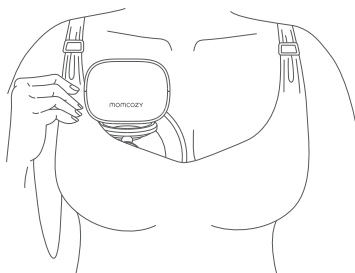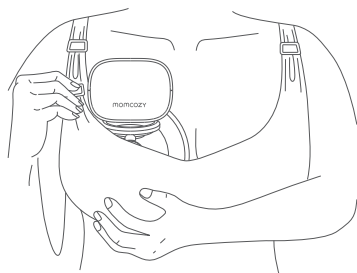

Rozpocznij odciąganie pokarmu

Nie wsuwaj laktatora bezpośrednio do biustonosza, postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku. Przed użyciem odłącz urządzenie od ładowarki.

1. Włącz urządzenie

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk włączania/wyłączania/pauzy, aby włączyć laktator.

Domyślnym trybem podczas pierwszego użycia jest tryb stymulacji.

Domyślnym poziomem jest poziom 1 (dioda LED poziomu ssania wyświetla 1 jako poziom 1).

2. Wybór trybu

Tryby: Tryb stymulacji i tryb ekspresji.

Przy pierwszym użyciu urządzenia, domyślnym ustawieniem jest poziom 1 siły ssania w trybie stymulacji.

Funkcja pamięci: Produkt zapamięta i uruchomi się z poprzednią siłą ssania trybu stymulacji przy następnym użyciu.

Krótko naciśnij przycisk wyboru trybu, aby przełączać między 2 trybami.

3. Wybór poziomu podciśnienia

Laktator Momcozy ma 9 ustawień podciśnienia dla każdego trybu, co daje pełną kontrolę nad tym, co jest wygodne i skuteczne w obu trybach.

Gdy poczujesz ciśnienie na sutkach, użyj przycisku Zwiększania/Zmniejszania, aby dostosować ciśnienie do preferowanego ustawienia.

Wskazówka: Wyższe ciśnienie nie zawsze oznacza większą ilość mleka. Nadmierne obciążenie brodawki sutkowej może zmniejszyć produkcję mleka. Jeśli nie czujesz ssania, sprawdź, czy pompka jest prawidłowo zamontowana.

Uwagi:

Laktator Momcozy nie może być używany podczas ładowania. Zawsze odłącz go od ładowarki przed użyciem i zamknij pokrywę ładowania.

Laktator Momcozy nie powinien być używany w pozycji leżącej, podczas forsownych czynności lub innych, które mogą prowadzić do obrażeń.

Korzystanie z laktatora nie powinno powodować bólu. Unikaj ustawienia zbyt wysokiego ciśnienia, które może powodować dyskomfort. Jeśli odczuwasz ból lub nadmierny dyskomfort, przerwij sesję.

Wstrzymywanie / rozpoczęcie odciągania pokarmu

Aby wstrzymać odciąganie pokarmu, naciśnij krótko przycisk Włącz/Wyłącz/Pauza.

Wskaźnik trybu zacznie migać. Naciśnij dowolny przycisk, aby kontynuować odciąganie pokarmu.

Wyłączanie laktatora

Aby wyłączyć laktator, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk włączania/wyłączania/pauzy. Ponadto produkt wyłączy się automatycznie po 30 minutach działania.

Uwaga: Wstrzymanie/uruchomienie odciągania, trybu i poziomu próżni nie spowoduje zresetowania czasu używania.

Wymowanie lejka

Użyj palca, aby złamać uszczelkę między lejkiem a tkanką piersi. Pochyl się lekko do przodu, aby zdjąć lejek z piersi po zakończeniu odciągania, a następnie trzymaj lejek otworem do góry, aby zapobiec wylaniu się mleka.



Zalecamy, aby użytkownik przerwał sesję odciągania, gdy objętość odciągniętego mleka w kolektorze zbliży się do 120 ml, aby uniknąć przepełnienia. Po zakończeniu odciągania mleka należy w odpowiednim czasie przelać świeżo odciągnięte mleko do innego pojemnika z nakrętkami lub woreczkami do przechowywania mleka.

Ostrzeżenie

- Dostarczone kolektory mleka służą do zbierania mleka podczas odciągania. Jeśli konieczne jest nakarmienie dziecka lub przechowywanie odciągniętego pokarmu, należy użyć innego kolektora z zakrętką.
- Odciągnięte mleko należy natychmiast schłodzić lub zamrozić albo przechowywać w temperaturze 16~25°C przez 2-4 godziny przed nakarmieniem dziecka.

Przechowywanie mleka

Przestrzeganie zalecanych technik przechowywania i przygotowywania może zapewnić bezpieczeństwo i jakość odciągniętego mleka matki dla zdrowia dziecka. Są to ogólne wytyczne dotyczące przechowywania mleka kobiecego w różnych temperaturach. Na to, jak długo można bezpiecznie przechowywać mleko matki, mają wpływ różne czynniki. Czynniki te obejmują objętość mleka, temperaturę w pomieszczeniu, w którym mleko jest odciągane, wahania temperatury w lodówce i zamrażarce oraz czystość otoczenia.

Przechowywanie mleka matki po odciągnięciu:

- Jeśli to możliwe, schładzaj mleko zaraz po odciągnięciu. Możesz włożyć je do lodówki, umieścić w chłodziarce lub izolowanym opakowaniu lub zamrozić w małych (2 do 4 uncji) partiach do późniejszego karmienia.
- Do przechowywania odciągniętego mleka matki używaj woreczków lub czystych pojemników przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Upewnij się, że pojemniki są wykonane ze szkła lub plastiku i mają szczelne pokrywki. Unikaj butelek z symbolem recyklingu numer 7, który wskazuje, że pojemnik może być wykonany z tworzywa sztucznego zawierającego BPA. Przed zamknięciem należy usunąć powietrze.
- Połóż torebki płasko do zamrożenia. Aby zapobiec sklejęciu się torebek, należy oddzielić je ręcznikami papierowymi.
- Nigdy nie przechowuj mleka matki w jednorazowych wkładkach do butelek lub plastikowych torebkach, które nie są przeznaczone do przechowywania mleka matki.
- Delikatnie obracaj pojemnikiem, aby wymieszać kremową część mleka, która może wypłynąć na wierzch, z resztą mleka. Nie wstrząsaj mlekiem. Może to spowodować rozpad niektórych cennych składników mleka.
- Świeżo odciągnięte lub odciągnięte mleko można przechowywać:

Rodzaj mleka matki			
	25°C lub chłodniej (temperatura pokojowa)	Lodówka 4°C	Zamrażarka -18 °C lub chłodniej
Świeżo odciągnięte lub odciągnięte	Do 4 godzin	Do 4 dni	Najlepiej w ciągu 6 miesięcy Dopuszczalne do 12 miesięcy
Rozmrożone, wcześniej zamrożone	1-2 godziny	Do 24 godzin	NIGDY nie zamrażaj ponownie mleka ludzkiego po jego rozmrożeniu.
Pozostałości po karmieniu (dziecko nie dokończyło butelki)	Stosuj w ciągu 2 godzin po zakończeniu karmienia dziecka.		

Miejsce i temperatura przechowywania

Wytyczne te dotyczą wyłącznie zdrowych dzieci urodzonych o czasie i mogą różnić się w przypadku wcześniaków lub dzieci z problemami zdrowotnymi. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.

Wskazówki dotyczące przechowywania:

- Na pojemniku do przechowywania mleka należy umieścić czytelną etykietę z datą odciągnięcia mleka oraz imieniem dziecka, jeśli mleko ma być przekazywane opiekunowi.
- Mleko matki nie powinno być przechowywane w drzwiach lodówki lub zamrażarki, ponieważ otwieranie i zamykanie drzwi może powodować zmiany temperatury, które mogą wpłynąć na jakość mleka.
- Jeśli świeżo odciągnięte mleko matki nie zostanie wykorzystane w ciągu 4 dni, należy je natychmiast zamrozić, aby zachować jego jakość.

Podczas zamrażania mleka matki:

Przechowuj mleko w małych ilościach, aby uniknąć marnowania, szczególnie jeśli część mleka nie będzie gotowa do użycia. Optymalna ilość to od 60 do 120 ml, co odpowiada jednej dawce karmienia.

Pozostaw około 2,5 cm wolnej przestrzeni na górze pojemnika, ponieważ mleko matki rozszerza się podczas zamrażania.

Mleko matki można przechowywać w izolowanej torbie chłodzącej z zamrożonymi okładami przez maksymalnie 24 godziny w trakcie podróży. Po dotarciu na miejsce, należy je natychmiast wykorzystać, przechować w lodówce lub ponownie zamrozić.

Bezpieczne rozmrażanie mleka matki:

Zawsze najpierw rozmrażaj najstarsze mleko, ponieważ z czasem jego jakość może się pogorszyć.

Istnieje kilka sposobów rozmrażania mleka matki:

- W lodówce przez noc.
- W pojemniku z ciepłą lub letnią wodą.
- Pod letnią bieżącą wodą.

Nigdy nie rozmrażaj ani nie podgrzewaj mleka matki w kuchence mikrofalowej, ponieważ mikrofalówka może zniszczyć składniki odżywcze w mleku oraz spowodować powstanie gorących punktów, które mogą poparzyć usta dziecka.

Jeśli mleko zostało rozmrożone w lodówce, należy je zużyć w ciągu 24 godzin. Liczba 24 godzin zaczyna się liczyć po całkowitym rozmrożeniu mleka, a nie od momentu wyjęcia go z zamrażarki.

Mleko matki, które zostało podgrzane lub doprowadzone do temperatury pokojowej, należy zużyć w ciągu 2 godzin.

Nigdy nie zamrażaj ponownie mleka matki po jego rozmrożeniu.

Warunki przechowywania

Jak przechowywać laktator

Przechowywanie krótkoterminowe

- Laktator należy przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Laktator i jego akcesoria należy przechowywać w bezpiecznym, czystym i suchym miejscu, z dala od dzieci.

Przechowywanie długoterminowe

Po pierwsze, przed długotrwałym przechowywaniem należy naładować laktator, co wydłuży jego żywotność. Po drugie, należy przechowywać go w miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby uniknąć uniknięcia przebarwień. Po trzecie, należy wyczyścić i wysuszyć zmywalne części przed ich przechowywaniem.

- Temperatura: -20 do 60°C
- Wilgotność względna: 15% - 90%
- Ciśnienie otoczenia: od 90 do 106 kPa

Specyfikacja

Wymiary pompy: 140mm x 112mm x 73mm

Masa pompy: 250g

Zakres próżni (wyrażenie): 140 mmHg-270 mmHg

Czas użytkowania: 180 minut

Czas ładowania: 150 minut

Znamionowe wejście: 5V-1A

Konserwacja

Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części, które mogłyby być wymieniane przez użytkownika: Otwarcie lub ingerencja w urządzenie spowoduje unieważnienie gwarancji. Jakiegokolwiek modyfikacje są zabronione. Gdy produkt nie jest używany przez dłuższy czas, akumulator rozładowuje się powoli. Aby uniknąć uszkodzenia akumulatora z powodu niskiego napięcia przez długi czas, należy ładować urządzenie co trzy miesiące.

Ostrzeżenie

Wymiana akumulatorów litowych przez nieodpowiednio przeszkolony personel może spowodować zagrożenie.

Nie należy czyścić ani konserwować urządzenia, gdy jest ono używane lub ładowane.



Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE: Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.



Deklaracja zgodności z UE

Niniejszym BATNA Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektyw:
Dyrektywa 2014/30/UE (EMC – kompatybilność elektromagnetyczna) – zapewnia, że urządzenie nie zakłóca innych sprzętów i nie jest podatne na zakłócenia.
Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS) – ogranicza stosowanie substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, oraz 2015/863/EU.
Dyrektywa 2014/35/UE (LVD – niskonapięciowa)

