

TERMOMETR KLASYCZNY

- Gwarantowana dokładność pomiaru temperatury
- Etui z efektem lupy ułatwia odczyt temperatury
- Pojemnik "motylek" ułatwiający strząsanie słupka cieczy pomiarowej
- Bezrtęciowy. Bezpieczny dla zdrowia i środowiska

Przed pierwszym użyciem termometru należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

Termometr klasyczny to szklany termometr medyczny przeznaczony do pomiaru temperatury ciała. Ciecz pomiarowa termometru nie zawiera rtęci, tylko płynny stop metali galu, indu, cyny i cynku. Ciecz ta jest całkowicie nietoksyczna i przyjazna dla środowiska.

WYKONANIE POMIARU

- Wyczyść i zdezynfekuj termometr bezpośrednio przed i po użyciu (patrz „Czyszczenie i dezynfekcja”).

- Przed pomiarem temperatury sprawdź, czy słupek z cieczą znajduje się poniżej 36°C.

1. Wybierz sposób pomiaru (pod pachą, w ustach lub w odbycie) i umieść odpowiednio termometr w wybranym miejscu. 2. Temperaturę mierz 8 min. 3. Po tym czasie ciecz pomiarowa wskaże zmierzoną temperaturę ciała na skali pomiarowej. Odczytaj temperaturę delikatnie obracając termometr w obie strony. Umieszczenie termometru w etui z efektem lupy ułatwia odczyt.

4. Po zmierzeniu temperatury, ciecz pomiarową ponownie sprowadź poniżej 36°C.

W tym celu umieść termometr w plastikowym pojemniku i mocno dokręć zieloną nakrętkę. Chwyć elastyczną końcówkę i wykonuj energiczne ruchy przegubem dłoni.

Wskazówka: Zalecamy strząśnięcie termometru bezpośrednio po zmierzeniu temperatury.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

Przed użyciem i po każdym użyciu przetrzyj termometr miękką szmatką nasączoną roztworem alkoholu izopropylowego lub zimną wodą z mydłem.

Uwaga: Nie używać gorącej wody do czyszczenia i dezynfekcji termometru.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Termometr klasyczny nie służy do specyficznych pomiarów temperatury, takich jak np. pomiar temperatury w celu wyznaczenia owulacji. 2. Nie gryźć, nie zginać, nie ścisnąć zbyt mocno termometru. 3. Nie upuszczać termometru, nie narażać termometru na wstrząsy i uderzenia. 4. Nie używać termometru, jeśli zauważono jakiegokolwiek wady lub pęknięcia. 5. Podczas pomiaru temperatury zachować należyłą ostrożność, aby uniknąć ewentualnego zranienia. 6. Unikać kontaktu cieczy pomiarowej z innymi metalami. 7. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 8. Temperatura u dzieci powinna być zawsze mierzona pod nadzorem osoby dorosłej. Nie mierzyć temperatury w ustach u dzieci poniżej 10 roku życia. 9. Nie wystawiać termometru na działanie wysokich temperatur oraz bezpośredniego światła słonecznego. 10. Użycie termometru nie zastępuje konsultacji lekarskiej. W przypadku utrzymującej się gorączki, zwłaszcza u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem.

UTYLIZACJA

W przypadku stłuczenia termometru i wylania się cieczy pomiarowej, można ją usunąć przy pomocy ściereczki zwilżonej wodą z mydłem. Odłamki termometru i zebraną ciecz należy wyrzucić do domowych śmieci (substancja jest nietoksyczna).