



Spis treści

1. Właściwości i najważniejsze funkcje	2
2. Przeczytaj, zanim włączysz urządzenie	3
3. Środki ostrożności	4
4. Specyfikacja techniczna	5
5. Opis urządzenia	5
6. Rozpoczęcie pracy urządzenia	6
7. Czyszczenie	7
8. Rozwiązywanie prostych problemów	9
9. Znormalizowane oznaczenia	10
10. Deklaracja EMC	11
11. Gwarancja	11
12. Karta gwarancyjna	13

1.Właściwości i najważniejsze funkcje

Urządzenie służy do higienicznego, szybkiego i efektywnego usuwania zatkanego nosa. Nie należy używać urządzenia do usułu lub gardła. Dzieci u osób niepełnosprawnych. Dzięki swojej konstrukcji zbiorniczek na wydzielinę można zdjąć i umyć, bez konieczności stosowania kosztownych jednorazowych, elementów. **Urządzenie zostało zaprojektowane przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych.** Jego kształt oraz higieniczna silikonowa końcówka chroni błonę śluzową nosa, zapobiegając jej uszkodzeniu nawet, gdy dziecko wykona nagły ruch. Aspirator przynosi szybką ulgę i poprawę samopoczucia.

- konstrukcja zapobiegająca powrotnemu przepływowi wydzieliny
- łagodne i szybkie usuwanie wydzieliny z nosa (2-3 sekundy)
- przeznaczony dla niemowląt, dzieci oraz osób niepełnosprawnych
- 9 poziomów siły ssania
- lampka nocna
- funkcja muzyki
- wbudowany akumulator - ładowanie przez kabel USB
- łatwy i wygodny w obsłudze
- specjalnie wyprofilowana miękka silikonowa końcówka
- bogate wyposażenie: panel sterujący, pojemniczka na wydzielinę, 2 silikonowe końcówki, zapasowa silikonowa uszczelka, przewód łączący panel z pojemnikiem, instrukcja obsługi
- higieniczny: łatwy w czyszczeniu, konstrukcja eliminująca ryzyko przeniesienia infekcji
- posiada certyfikat CE

UWAGA:

MESCOMP TECHNOLOGIES zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w sprzęcie i oprogramowaniu wynikających z postępu technologicznego.

2.Przeczytaj, zanim włączysz urządzenie

- Aspiratora do nosa dla dzieci należy używać wyłącznie do łagodzenia zatkanego nosa. Nie należy używać urządzenia do usułu lub gardła.
- Urządzenie musi być obsługiwane przez osobę dorosłą, nie należy pozwalać dzieciom na samodzielne korzystanie z urządzenia.
- Gdy nagromadzona objętość wydzieliny przekroczy bezpieczną pojemność pojemniczka (linia max) należy wyczyścić urządzenie.
- Przed i po użyciu urządzenia należy wyczyścić pojemniczka oraz dokładnie go osuszyć. (Rozdział 8.Czyszczenie).
- Nie należy wkładać silikonowej końcówki zbyt głęboko do nosa.
- W przypadku podrażnienia nosa lub krwotoku należy zakończyć czyszczenie nosa . W takiej sytuacji zalecany jest kontakt z lekarzem.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku osobistego.
- Gdy moc ssania słabnie podczas użytkowania, należy naładować akumulator.
- Nie należy korzystać z urządzenia dłużej niż kilka sekund.
- Podczas używania tego urządzenia w celu oczyszczenia nosa dziecka/dorosłego należy upewnić się, że dziecko/dorosły oddycha swobodnie. Nie należy zmuszać go do wstrzymywania oddechu, zamykania ust lub polykania, aby uniknąć nierównowagi ciśnienia w błonie bębenkowej spowodowanej podciśnieniem wytwarzanym przez urządzenie.
- Należy upewnić się, że wszystkie akcesoria są zainstalowane.
- bezpieczny: specjalnie wyprofilowana miękka silikonowa końcówka
- W przypadku problemów z urządzeniem, usłerkę proszę zgłosić w serwisie Mescomp Technologies lub w serwisie autoryzowanym (lista serwisów dostępna na stronie internetowej Mescomp Technologies S.A.)
- Otwarcie lub próba rozkręcenia zewnętrznej obudowy urządzenia powoduje **utrata gwarancji**.

UWAGA:

Gwarancja na urządzenie nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieodpowiedniego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi.


3.Środki ostrożności

- ⚠Ostrzeżenie. Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać urządzenie z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu poknieniu małych elementów.
- ⚠Do ładowania urządzenia należy używać zasilacza 5V. Napięcie powyżej 5 V nie może naładować urządzenia
- ⚠Nie używać aspiratora do nosa podczas ładowania.
- ⚠Nie używać akcesoriów niezalecanych przez producenta
- ⚠Nie należy upuszczać ani wkładać żadnych przedmiotów do otworów lub węży.
- ⚠Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych produktu ani umieszczać go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub kanapa, gdzie otwory wentylacyjne mogą zostać zablokowane. Otwory wentylacyjne należy utrzymywać w czystości, wolne od kłasków, włosów i podobnych materiałów.
- ⚠Nie wolno używać urządzenia podczas snu.
- ⚠Zadna modyfikacja tego urządzenia nie jest dozwolona. Nie należy podejmować prób demontażu urządzenia bez przestrzegania informacji zawartych w niniejszej instrukcji. Otwarcie lub próba rozkręcenia zewnętrznej obudowy urządzenia powoduje utratę gwarancji.
- ⚠Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli dowolna z jego części jest uszkodzona oraz jeśli urządzenie wpadło lub było zanurzone w wodzie podczas ładowania. Niezwłocznie należy odesłać urządzenie do centrum serwisowego celem jego sprawdzenia i naprawy.
- ⚠Nie używać, jeśli urządzenie się przegrzewa, działa nieregularnie lub wykazuje oznaki uszkodzenia obudowy.
- ⚠Nie narażać na działanie wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności. Nie używać i nie przechowywać urządzenia w miejscach zapyłonych, zabrudzonych. Nie zanurzać CALIGO urządzenia w cieczach.
- ⚠Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu substancji łatwopalnych: gazu, tynu lub aerozolu.
- ⚠Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscach, gdzie może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub umywalki.

4.Specyfikacja techniczna

Model:	Elektryczny aspirator do nosa MM-127M HappiNosek MAX
Maksymalna moc ssania:	70 kPa
Napięcie wejściowe:	1A
Napięcie ładowania :	5V
Poziom hałasu:	65±5 dB
Warunki przechowywania:	5-35°C
Typ ładowania:	USB-C
Czas pracy przy pełnym naładowaniu:	2,5 godz.
Pojemność akumulatora:	2000 mAh
Wyposażenie:	panel sterujący, pojemnik na wydzielinę, 2 silikonowe końcówki do nosa, zapasowa uszczelka, wężyk, szczoteczka do czyszczenia, klips, kabel do ładowania, instrukcja obsługi
Wymiary produktu:	125 x 90 x 50 mm
Waga urządzenia:.	300g

5.Opis urządzenia

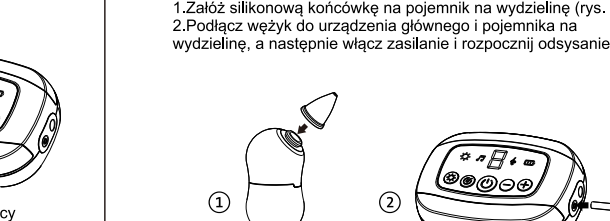

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.